

RESPIMER® bébé


Les nouveau-nés et les nourrissons respirent instinctivement par le nez, il est donc important que leurs voies respiratoires soient dégagées. Le **Mouche bébé RESPIMER®** soulage en douceur le nez congestionné de bébé pour l'aider à mieux respirer en cas de rhume et de rhinopharyngite.

Son embout extra souple est adapté au nez de bébé et permet d'évacuer l'excès de mucus en douceur.

Mouche bébé RESPIMER® pour nourrissons et jeunes enfants*

Contenu : 1 mouche bébé + 5 filtres protecteurs à usage unique

Comment utiliser le Mouche bébé RESPIMER® ?

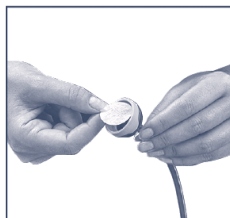

Avant la première utilisation, rincez le mouche bébé sous l'eau chaude et séchez-le soigneusement.

Procédez à l'aspiration nasale avant de nourrir bébé, lorsque celui-ci est éveillé et calme.

- 1- Lavez-vous les mains.
- 2- Insérez un filtre protecteur à usage unique dans la coque arrière et fermez le mouche bébé avec la coque avant.
- 3- Assurez-vous que tous les composants soient proprement assemblés.
- 4- Allongez bébé sur le dos.
- 5- Placez l'embout extra souple du mouche bébé à l'entrée de la narine de bébé et inspirez doucement par l'embout buccal. Le filtre protecteur bloque le mucus.
- 6- Répétez l'opération dans l'autre narine.
- 7- Relevez doucement bébé et essuyez-lui le nez avec un mouchoir.
- 8- Jetez le filtre usagé après chaque utilisation.



Après chaque utilisation, rincez le **Mouche bébé RESPIMER®** à l'eau chaude et séchez-le soigneusement. Pour des raisons d'hygiène et pour garantir de bonnes performances, insérez un nouveau filtre à usage unique avant chaque utilisation.

Utilisez aussi souvent que nécessaire en cas de sécrétions nasales.

Pour une meilleure élimination des sécrétions nasales, utilisez le spray **RESPIMER® Hypertonique®** bébé avant l'aspiration nasale.



Recharge de 20 filtres protecteurs vendue séparément.

Veillez vous référer à la notice de chaque produit pour une utilisation optimale et sûre.

* Il est recommandé de demander l'avis d'un médecin ou d'un professionnel de santé avant d'utiliser le **Mouche Bébé RESPIMER®** pour les nouveau-nés ou en cas de malformation nasale à la naissance, d'intervention chirurgicale nasale récente ou de lésion nasale.


Si les symptômes persistent plus de 5 jours, consultez un professionnel de santé.

Ne pas stériliser, ne pas faire bouillir.

Ne pas utiliser après la date d'expiration.

N'utilisez pas le mouche bébé si son aspect d'origine a été altéré ou sans filtre protecteur à usage unique.

À conserver dans son emballage d'origine.

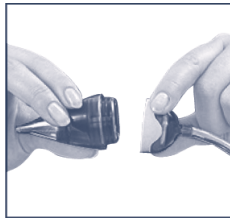

⚠ Avertissement : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Petites pièces.
Tenir hors de la portée et de la vue des bébés et des enfants.

Les incidents graves doivent être signalés au Laboratoire de la Mer et à l'autorité locale compétente.

www.respimer.com

Dispositif médical – Date de révision de l'étiquetage : 2020/10

Laboratoire de la Mer
ZAC de la Madeleine
Avenue du Général Patton
35400 Saint-Malo – FRANCE

Perrigo
Distributeur :
Laboratoires Omega Pharma France
20, rue André Gide
92320 Châtillon – FRANCE

1ère date apposition
marquage CE : Mars 2008



PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

**VALISLETTE, MOUCHE BÉBÉ,
FILTRÉS ET BOÎTE**
À RECYCLER



CONSEIL POUR UN TRI LOCALISÉ - WWW.CONSEILSETRI.FR



N'utilisez pas un
produit cassé ou
endommagé



Jetez le produit
dans la poubelle



Papier à recycler
PAP