

RESPIMER® enfant

NEZ CONGESTIONNÉ
Rhume, Rhinopharyngite.



RESPIMER® enfant est indiqué dans le traitement de la rhinite, du rhume et de la rhinopharyngite en cas de nez bouché, nez qui coule et éternuements.

RESPIMER® enfant est un décongestionnant, associant l'eau de mer hypertonique 100 % naturelle, non diluée, riche en minéraux et oligo-éléments avec 3 huiles essentielles (Ravintsara, Thym à Linalol et Menthe des champs). Formule non médicamenteuse (sans vasoconstricteurs ni corticoïdes) et sans conservateurs, RESPIMER® enfant est une formule sans effet de rebond, respectueuse de la muqueuse nasale. Sans effet desséchant.

POURQUOI UTILISER RESPIMER® ENFANT ?

RESPIMER® enfant possède une formule triple action pour un soulagement rapide et durable :

1. Action décongestionnante

La forte concentration en sels minéraux de RESPIMER® enfant permet un effet décongestionnant mécanique, appelé "effet osmotique".

2. Action fluidifiante

La solution d'eau de mer hypertonique fluidifie le mucus, ce qui aide à l'évacuer. Une fois le mucus éliminé, le nez qui coule et qui est bouché est soulagé.

3. Action purifiante*

RESPIMER® enfant aide à évacuer les virus et bactéries par effet de drainage* : l'évacuation du mucus en excès et donc des pathogènes qui y sont piégés est facilitée par sa fluidification.

L'efficacité et la tolérance de RESPIMER® enfant sont cliniquement prouvées⁽¹⁾.

RESPIMER® enfant réduit également la difficulté à respirer, améliore la qualité du sommeil tout en réduisant la fatigue⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Référence à l'étude RHINO - Étude portant sur 553 adultes souffrant de rhinite aiguë.

QUE CONTIENT LA FORMULE DE RESPIMER® ENFANT ?

INGRÉDIENTS : 95 % Maris aqua, Xylitol, Alcool, Phosphate de chlorure de Myristamidopropyl PG-Dimonium et Aqua, Huile de feuilles de Mentha Arvensis, Huile de feuilles de Cinnamomum Camphora, Huile de Thymus Vulgaris (fleur/feuille).

Formule non médicamenteuse. Sans vasoconstricteurs et sans corticoïdes. Sans conservateurs. Sans effets rebonds. Formule bien tolérée.

QUELS RENSEIGNEMENTS DOIS-JE SAVOIR AVANT D'UTILISER RESPIMER® ENFANT ?

Peut être utilisé chez les jeunes enfants dès l'âge de 3 ans.

- Ne contient pas de vasoconstricteurs ni de corticoïdes
- N'assèche pas la muqueuse nasale
- Ne crée pas d'accoutumance et ne provoque pas d'effet de rebond
- Ne contient pas de conservateurs

Contre-indications :

RESPIMER® enfant ne doit pas être utilisé :

- pendant la grossesse ou l'allaitement
- chez les enfants de moins de 3 ans
- si vous avez une allergie à l'un des ingrédients
- si vous avez de l'asthme.

COMMENT UTILISER RESPIMER® ENFANT ?

POSOLOGIE

Enfants de 3 à 15 ans : 1 pulvérisation dans chaque narine, jusqu'à 4 fois par jour.

MODE D'ADMINISTRATION

La surveillance d'un adulte est recommandée pour l'utilisation chez les enfants.

De 3 à 6 ans, le dispositif doit être utilisé par un adulte.

1. Mouchez-vous.
2. Retirez le capuchon de protection.
3. Avant la première utilisation, appuyez fermement sur l'actionneur plusieurs fois jusqu'à ce que la solution s'écoule.
4. La tête droite, pulvérisez dans chaque narine, respirez légèrement par le nez.
5. Laissez la solution agir pendant quelques minutes avant de vous moucher.

Après chaque utilisation, nettoyez l'actionneur de pulvérisation et mettez le capuchon de protection. Conservez dans son emballage d'origine.

Utilisez un dispositif par personne afin d'éviter de propager l'infection.

Une sensation de picotement temporaire peut survenir en cas de sensibilité ou d'irritation nasale.



COMMENT RESPIMER® ENFANT DOIT ÊTRE CONSERVÉ

Utiliser dans les 6 mois suivant la première pulvérisation.

Ne pas utiliser après la date d'expiration imprimée sur l'emballage.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser si le produit est endommagé.

Si les symptômes nasaux durent plus de 7 jours, consultez un médecin.

Tout incident grave survenu en rapport avec ce produit doit être signalé au fabricant Laboratoire de la Mer et via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site Internet : www.signalement-sante.gouv.fr.

Fabriqué en France - FORMULE BREVETÉE - Dispositif médical - Spray nasal

Laboratoire de la Mer
Avenue du Général Patton
ZAC de la Madeleine
35400 Saint-Malo - FRANCE

Distributeur :
Laboratoires Omega Pharma France
20, rue André Gide
92320 Châtillon - FRANCE



Date du premier marquage CE : 2014-02
Date de révision de la notice V1 : 2022-02

20 mL

CNOT1395 LF30507A

TNI - Lab. de la MER - CNOT1395 -150 X 210 mm à plat
150 X 26,5 mm plié - 50g - Noir R° - le 11/04/2022