

RESPIMER®

HYGIÈNE DE L'OREILLE

Dès 6 mois

L'oreille se protège des agressions extérieures en sécrétant une «barrière-filtre» : le cérumen. Chez la plupart des individus, le cérumen s'évacue naturellement vers l'extérieur du conduit auditif grâce au système autonettoyant de l'oreille. L'aspect et la quantité de cérumen produits varient d'un individu à l'autre. Ainsi, certaines personnes produisent plus ou moins de cérumen. Plusieurs facteurs (tels que le port de prothèse auditive, l'exposition aux poussières, la présence de poils ou encore la forme étroite du conduit auditif chez les enfants) empêchent l'oreille d'éliminer l'excès de cérumen qui s'accumule progressivement dans le conduit auditif et peut entraîner la formation de bouchons obstructifs. La présence de bouchons de cérumen s'accompagne de désagréments comme de démangeaisons, des douleurs légères, une diminution de l'audition, des bourdonnements ou une sensation de vertiges.

RESPIMER® HYGIÈNE DE L'OREILLE est spécialement conçu pour nettoyer l'oreille en douceur, et ainsi :

- Évacuer l'excès de cérumen et débris de bouchons de cérumen,
- Prévenir la formation de bouchons.

Contenu :

1 flacon de 115 mL, sans gaz propulseur,
1 embout auriculaire en forme d'otoscope pour une utilisation douce et agréable préservant l'intégrité du tympan.

Composition : Formule naturelle

Ingrédients :

Solution 100 % d'eau de mer isotonique (équivalent à 9 g/L de NaCl).

Sterile et sans conservateurs.

Mode d'action :

Contient naturellement des bicarbonates pour fluidifier et dissoudre le cérumen, ainsi que les impuretés (squames, poussières).

RESPIMER® HYGIÈNE DE L'OREILLE permet au système autonettoyant de l'oreille de bien fonctionner.

Conseils d'utilisation :

Convient à un usage quotidien chez l'adulte, l'enfant et le nourrisson dès l'âge de 6 mois.

Pour les personnes sujettes aux bouchons de cérumen, exposées à la poussière ou aux produits chimiques, pour laver et prévenir la formation de bouchons : 1 pulvérisation dans chaque oreille, 2 à 3 fois par semaine.

En cas de bouchon de cérumen : 2 à 3 pulvérisations dans l'oreille, quotidiennement pendant 7 jours. Pour favoriser l'écoulement des débris de cérumen, pulvériser après l'application des gouttes céruménolytiques.

Pour les porteurs de prothèses auditives pour assurer un fonctionnement optimal de l'appareillage : 1 pulvérisation dans chaque oreille, 2 à 3 fois par semaine.

Instructions d'utilisation :

La présence d'un adulte est recommandée pour une utilisation chez les enfants. Pour un usage externe uniquement. Pour plus de praticité, utiliser RESPIMER® HYGIÈNE DE L'OREILLE pendant la douche ou le bain.

- 1 Fixez l'embout sur le dessus de la bouteille.
- 2 Placez l'index dans l'embout.
- 3 Insérez doucement l'embout dans l'oreille tout en maintenant la tête droite et effectuez une pulvérisation de 1 à 3 secondes.
- 4 Laissez la solution dans l'oreille pendant 10 secondes.
- 5 Inclinez la tête pour permettre à la solution de s'écouler.
- 6 Séchez doucement l'oreille externe avec un mouchoir ou une serviette propre.
- 7 Appliquez dans l'autre oreille.



Appuyer

Attendre

Évacuer

Essuyer

Rincez l'embout à l'eau chaude après chaque utilisation.

En cas de production excessive de cérumen, laissez le produit agir pendant 10 minutes. Répétez la procédure jusqu'à 4 fois si nécessaire.

Effets secondaires connus :

Vous pouvez ressentir une sensation d'oreille bouchée qui disparaît rapidement une fois que vous inclinez la tête pour permettre à la solution de s'écouler.

Précautions :

Consultez un médecin avant utilisation si vous êtes diabétique ou avez des problèmes d'immunosuppression.

N'insérer aucun objet dans l'oreille avant ou après utilisation (coton-tige, stylo...). Si vous êtes sujets aux vertiges, utilisez RESPIMER® HYGIÈNE DE L'OREILLE en position assise.

En cas de sensation persistante d'oreille bouchée, CESSER l'utilisation et consulter un médecin.

Utiliser RESPIMER® HYGIÈNE DE L'OREILLE à température ambiante entre 20°C et 25°C pour éviter une sensation de froid. Vous pouvez passer la bouteille sous l'eau chaude pour réchauffer la solution.

Ne séchez pas trop fort le conduit auditif après l'utilisation, cela pourrait provoquer une irritation ou une inflammation.

Si les symptômes persistent, consultez votre professionnel de santé.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

Ne pas utiliser si l'emballage n'est pas dans son état d'origine.

Pour usage externe uniquement.

Contre-indications :

Ne pas utiliser si vous avez mal à l'oreille ou une infection auriculaire, le syndrome de l'oreille du nageur, une perforation du tympan, des tubes compensateurs de pression (PET, œillets), des troubles de l'équilibre, si vous avez subi une chirurgie à l'oreille ou si vous avez un corps étranger dans l'oreille ou un bouchon d'oreille obstructif (troubles de l'audition, douleurs, bourdonnements, sensation de blocages, surdité temporaire après une baignade ou une douche).



Laboratoire de la Mer
Avenue du Général Patton - ZAC de la Madeleine
35400 Saint-Malo - FRANCE

Distributeur en FR

Laboratoire Perrigo France
20, rue André Gide - 92320 Châtillon - FRANCE



Date de 1^{ère} apposition de marquage CE : Janvier 1999. Dispositif médical. Date de révision : 2022/03

CN01590



AGENCE DE CREATION
69, rue des Gros Grès
92700 Colombes
01 56 05 47 75
contact@426c.com
www.426c.com

V2 - 12 octobre 2022
Format : 150 x 210 mm

● PANTONE 294